

Anwendung

① Schieben Sie Ihre x-top-Schutzhülle so weit wie möglich über den Penis.




② Fixieren Sie x-top mit dem elastischen Klettverschluss am Penis. So stramm, dass die Schutzhülle fest sitzt. Den ergänzenden Halt gibt eine eng anliegende Unterhose.

③ Dank des wiederverschließbaren Verschlusses können Sie den Sitz mehrfach nachjustieren.

④ Wichtig ist, dass die Schutzhülle nicht abrutschen kann und immer stramm sitzt. Tragen Sie keine Boxershorts, sondern eng anliegende Unterhosen. Wechseln Sie Ihre x-top-Schutzhülle nach Bedarf, mindestens aber 1 x täglich. Benutzte Schutzhüllen entsorgen Sie umweltgerecht mit dem ganz normalen Haushaltsmüll.

Wichtig: Der Durchmesser Ihres Penis verändert sich, z. B. durch unterschiedliche Temperaturen. Um zu vermeiden, dass Ihr x-top sich löst, regulieren Sie mit dem Klettverschluss nach. x-top muss den Penis fest umschließen.

Keine Boxershorts, sondern enge Unterhosen tragen.

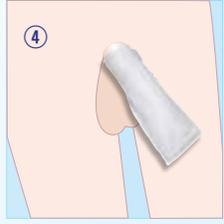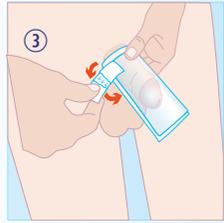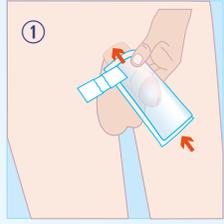

So einfach, so sicher.

x-top Schutzhüllen sind durch ihre ergonomische Form etwas ganz Besonderes. Sie nehmen die Flüssigkeit im Inneren sicher auf. Ihr neuartiges Design gewährleistet, dass der Penis vollständig umschlossen ist. Der elastische Klettverschluss sorgt für sicheren Halt.

Der patentierte Supercore®Saugkern und das atmungsaktive, wasserdichte Außenvlies garantieren, dass die Flüssigkeit im Inneren der x-top Schutzhülle eingeschlossen wird. Und all das, bei einem geringen Gewicht und einer weichen Oberfläche, mit einem Maximum an Tragekomfort.



Elektromedizin

LANCY Elektromedizin
 An der Bachmühle 4, 74821 Mosbach
 Tel.: +49 6261 938693, Fax: +49 6261 915759
 info@lancy-elektromedizin.de, www.lancy-elektromedizin.de
 www.lancy-shop.de



Erfolgreiche Zertifizierungen:
 Medizinproduktegesetz MPG, DIN EN 13485
 Präqualifizierungsverfahren



Verantwortlich für den Inhalt: Birgitt Lantzberg, Abbildungen: shutterstock.de, LANCY McAirAids Stand: 10/2015

Innovativer Schutz bei Blasenschwäche



*elegant
 diskret
 sicher*



Aktiv. Im Leben.

Die Innovation bei Blasen- schwäche

ZAHLREICHE MÄNNER ...

leiden deutschlandweit an Blasen Schwäche. Ist man selbst betroffen, weiß man, dass der Alltag sehr darunter leiden kann. Deswegen war es bei der Produktentwicklung wichtig, effektiven Schutz und zugleich höchstmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten.

EINE GROSSE AUFGABE – EINE PERFEKTE LÖSUNG:

Die neuartigen x-top Schutzhüllen speziell für Männer.

Sie sind leicht, extrem saugstark und bieten durch ihre Passform sicheren Rundum-Schutz. Sie verrutschen nicht und nehmen die Flüssigkeit zuverlässig auf. So bieten sie ein hohes Maß an Sicherheit und Diskretion, die man in jeder Situation fühlt.

Jetzt online erhältlich!
www.lancy-shop.de



Latex, klebe- und bindemittelfreie Saugkern (Supercore®) aus Zellstoff und Superabsorber



weiches,
hautfreundliches
Innenvlies

Geruchsbindend

Atmungsaktives,
wasserdichtes Außenvlies

Elastischer Klettverschluss
für sicheren Halt

DIE VORTEILE DER PATENTIERTEN X-TOP SCHUTZHÜLLEN:

- Der Penis wird vollständig umhüllt
- Sicherer Halt dank des elastischen Klettverschlusses
- Schnelleres Absorbieren
- Sicheres Einschließen der Flüssigkeit
- Sehr dünn und sehr leicht
- Atmungsaktives, geruchsbindendes, weiches Außenvlies
- Latexfrei
- Einfache Anwendung
- Hygienisch
- 1,20 Euro/Stück

Jetzt gratis testen!
Testen Sie die beigelegte Probe x-top-Level 2



* Unter fachärztlicher Kontrolle dermatologisch getestet durch: Dermatest GmbH Engelstraße 37, 48143 Münster. Gutachten vom 29.07.2013. Testergebnis „SEHR GUT“