

استمتع مرة أخرى بحياة عاطفية مُرضية!

- استمتع مرة أخرى بحياتك العاطفية المليئة بالمرح بدون أي مشاكل.
- أثبت العلاج LANCY Men من خلال الدراسات والاستخدام السليم
- أنه سهل الاستعمال
 - ليس له أعراض جانبية
 - مُنخفض التكلفة.
 - يأخذ المريض هذا العلاج خفية في المنزل، بدون ضغط الوقت
 - وبدون الاعتماد على مساعدة من الآخرين.

وثُبتت الدراسات نجاح العلاج على النحو التالي:

فترة علاج 3 أشهر - تحسُن بنسبة 58%

„إن التحفيز الكهربائي عبر الجلد لعضلات قاع الحوض المخططة أدى إلى انتصاب يؤهل للقدرة على الجماع مع 58% من المرضى بعد ثلاثة أشهر من العلاج (بواقع 20 دقيقة/يوم).“ (دكتور ديروت عام 1998)

فترة علاج 6 أشهر - تحسُن بنسبة 93%

عندما سألت جمعية التوظيف ودعم التدريب (GAQ) „هل ساعدكم العلاج في تحسين الانتصاب؟“ أجاب 93 % (119/128) من مجموعة الرجال الذين تلقوا العلاج الكهربائي بـ „نعم“، وعلى الجانب الآخر في مجموعة الرجال الذين تناولوا الفياجرا أجاب بـ „نعم“ فقط 27 % من المرضى (124/37).“ (أ. د. زومر عام 2014)

„من المفترض أن يؤدي العلاج الكهربائي الخاص للعضلات الملساء وعضلات قاع الحوض المخططة لدى مجموعة مختارة من الرجال ممن يعانون من ضعف الانتصاب إلى علاج هذا الضعف في الانتصاب.“ (أ. د. زومر عام 2014)

„يمكنك الحصول على الجهاز العلاجي لدينا بما في ذلك الملحقات الخاصة به وضمنًا لمدة 12 شهرًا على الجهاز نفسه بمبلغ 490 يورو. تكاليف البيع للخارج غير متضمنة ويجب تحديدها مُسبقًا.“



Elektromedizin

LANCY Elektromedizin
An der Bachmühle 4
74821 Mosbach

هاتف: 938693 06261

فاكس: 915759 06261

info@lancy-elektromedizin.de
www.lancy-elektromedizin.de



من أجل فاعليتك الجنسية



شهادات اعتماد ناجحة:
قانون المنتجات الطبية MPG، والمواصفة DIN EN 13485، ومرحلة التأهيل المُسبق



كن في الطلائع

في أغلب الأحيان. لفترة أطول. أحب.

LANCY Men
Elektronmedizin

تطور ملحوظ في فاعليتك الجنسية.



هل يمكن أن يحدث ذلك...
هل يمكن أن يحدث ذلك...


أسباب ضعف الانتصاب مختلفة ويتعين توضيحها من قبل طبيب لإيجاد العلاج المناسب:

- مرض السكري
- علامات الشيخوخة، وتكلس الأوعية الدموية الناقلة للدم
- الاضطرابات النفسية والهرمونية
- التسرب الوريدي في أنسجة الجسم الكهفي
- إعادة بناء أنسجة الجسم الكهفي، على سبيل المثال بعد القساح
- أذى نتيجة عمليات في البروستاتا
- العلاج بالإشعاع والإصابة
- الإفراط في تعاطي الكحول، وإدمان النيكوتين، والآثار الجانبية للمخدرات
- الاضطرابات الأيضية مع الاعتلال العصبي
- بعض حالات الشلل النصفي
- الإجهاد على المستوى الشخصي ومستوى العمل

ماذا يمكن أن يفعل الرجل؟
العلاج بجهاز LANCY Men

مع أي أنواع الضعف الجنسي يعمل هذا الجهاز؟

إن جهاز LANCY Men يناسب علاج ضعف الانتصاب عندما تتلف أو تضعف أنسجة عضلات نظام الجسم الكهفي أو أنسجة عضلات قاع الحوض (بشرط أن يكون السبب عضويًا). مهم: حتى مع

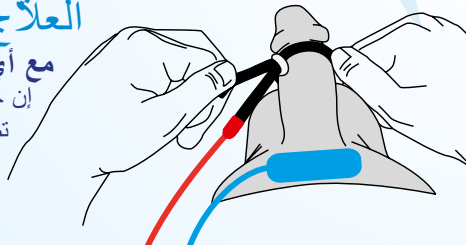

فشل العلاج بالحقن الذاتي للجسم الكهفي، يمكن مع العلاج بجهاز LANCY Men الوصول للانتصاب مرة أخرى. وبعد الانتهاء من العلاج بهذا الجهاز، يمكن في أي وقت بعد ذلك نجاح العلاج بالحقن الذاتي للجسم الكهفي؛ حيث يمكن استخدام هذا العلاج للوقاية (لمنع تصلب الأنسجة قبل عمليات البروستاتا وبعدها) أو لتعزيز جودة الانتصاب وتحسينها.


كم مرة وحتى متى؟

ينبغي استخدام العلاجات الفردية يوميًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بواقع 30 دقيقة للمرة الواحدة.

كيف يعمل جهاز LANCY Men؟

يعمل جهاز LANCY Men بتيار كهربائي ثنائي الطور. وبسبب الدائرة الكهربائية الخاصة، فإن الجهاز لطيف على الجلد وآمن. تم تزويد الجهاز بثلاثة برامج مختلفة يتم من خلالها تحديد التردد بدقة. ووفقًا لتشخيص حالة المريض، يتم تلقائيًا اختيار البرنامج وضبط فترة تطبيقه. يمكن ضبط شدة التيار الكهربائي

إن العلاج بجهاز LANCY Men الرقيق والقائم على التحفيز بالتيار الكهربائي يعمل بالترددات المنخفضة والتيارات كهربائية غير ضارة بالمرة. توضع فوق جلدك أقطاب كهربائية لاصقة والتي تعمل على تحفيز الأعصاب والأنسجة العضلية، كما هو موضح على سبيل المثال في الرسم الموجود على اليسار لاستخدام برنامج 1.

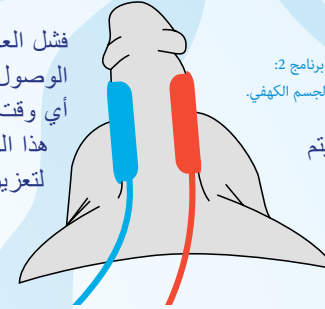

جهاز LANCY Men


الشكل الأيسر يُشير إلى برنامج 2:
تقوية أنسجة عضلات الجسم الكهفي.

والذي يعتمد أيضًا على نظام الأقطاب الكهربائية. ويتم ضبط هذا النظام بحيث يكون الشعور بالتحفيز كبيرًا جدًا ولكن غير مؤلم.

متى يحظر استخدام الجهاز؟

في هذه الحالة لا يجوز استخدام جهاز LANCY Men أو يمكن استخدامه فقط بعد استشارة الطبيب! – موانع الاستعمال للمستخدمين:

المزروع لهم تجهيزات إلكترونية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مضخات أو الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو من نوبات التشنج (الصرع) أو أمراض جلدية في مكان وضع الأقطاب أو أمراض خبيثة (سرطانية) في نطاق الاستخدام.

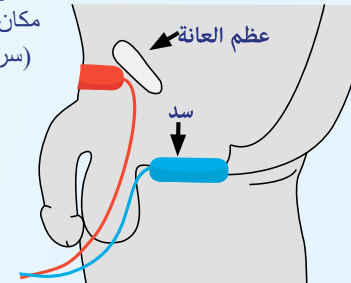

الشكل الأيمن يُشير إلى برنامج 3:
تقوية قاع الحوض